


Notice du en Français:

Lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif.
Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.

Utilisation prévue, indications:

Le  est un dispositif médical dont l'objet est la protection curative et préventive des escarres du sacrum, de la crête iliaque et du grand trochanter. Il peut être associé à des soins tels que pansements, et/ou vêtements tel que pyjama ou produit d' incontinence.

Dispositif médical pour patient unique.

Caractéristiques:

Demi Coque en mousse de polyuréthane souple HR, associé à une housse Néoprène au design spécifique (photo 1, 2), avec sangle entre-jambe et ceintures se solidarissant entre elles(photo 3), permettant le positionnement à l' endroit du bassin avec le dispositif en mousse de manière à le protéger en éliminant le points d'appui (photo 4).

- Design anatomique et solidaire du bassin
- Autorise tous les mouvements
- Maintien du DM quelque soit la position
- Facile d'utilisation et d 'entretien

Contre-indications, précautions:

La thermo-sensibilité est indicative sans valeur de mesure, elle ne se soustrait pas à un contrôle habituel ou/et inopiné du soignant. En effet, des facteurs environnants peuvent modifier les seuils, tel que l' exposition au soleil, le contact avec un objet chauffant,etc...

Consignes d' utilisation:

Mise en place du dispositif dans la housse

- 2- Ouvrir les 3 pressions dans la partie supérieure de la housse , plier le DM et entrer les extrémités, les insérer aux extrémités correspondantes de la housse
- 2- Couvrir la partie supérieure et inférieure du dispositif avec les bords correspondants de la housse.

3- Fermer les pressions (photo 4).

4- Installer le dispositif (photo 2) tel que sur la photo 3,4, c'est à dire l' entrejambe contre le pelvis ou les deux ceintures viennent se scratcher.

Photo 1



Photo 2

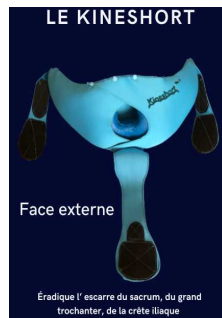


Photo 3



Photo 4



Conseils d'entretien et composition:

1/ Kineshort:

Composition : 100 % mousse de polyuréthane HR ,Moins de 50% de densité,
peau de surface polyuréthane

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse ou, en cas de nécessité de désinfection,
par l'utilisation d'un produit pour usage hospitalier type Anios ou équivalent.

2/ housse :

Composition : 90% Polyester , 4% Viscose, 1% Elasthanne

Entretien : Lavage 30°, pas de repassage, séchage tambour modéré, chlorage
interdit, nettoyage à sec interdit.

Matières Oekotex100

Le dispositif complet est en Taille Unique

En cas de détérioration du dispositif médical, changez-le. Ne pas essayer de réparer
cet article.

Important : Bien que tous nos efforts aient été portés sur l'utilisation de techniques de pointe afin d'obtenir un niveau optimal de fonctionnalités, de résistance, de durabilité et de confort, il n'est pas garanti que l'usage de ce produit prévienne tout préjudice corporel.

Le packaging contient :

- 1 **Kineshort** TM [®]
- 1 Housse
- 1 NOTICE D'UTILISATION
- 1 ATTESTATION D'INFORMATION
POUR UN USAGE INDIVIDUEL

Matériau-vigilance

En cas d'incident quelqu'il soit, vous devez aller sur le site www.cosinov.com, cliquer sur le lien de l' ANSM, remplir le formulaire dédié.

Il est primordial de signaler quelque problème dans "contact" du site CosinoV également, afin d'engager toutes les démarches utiles et sécuritaires.

Toute observation, même mineure doit être échangée pour permettre la mise à jour, l'amélioration constante du dispositif.

Etiquette composition:

